

MedentiLOC® Abutment



- Die kostengünstige Alternative zum Locator™ Abutment
- L' alternative économique au pilier Locator™
- L' alternativa economica al componente Locator™

Locator® ist eine eingetragene Marke von Zest Anchors LLC
Locator® est une marque déposée de Zest Anchors LLC
Locator® è un marchio registrato da Zest Anchors LLC

Die abgewinkelten MedentiLOC Abutments geben Ihnen erstmalig die Möglichkeit, Divergenzen zwischen Implantaten vernünftig auszugleichen. Denn gerade eine möglichst parallele Einschubrichtung ist für die dauerhafte Funktion solcher prothetischer Versorgungen unerlässlich.

Les piliers angulés MedentiLOC permettent pour la première fois de compenser les divergences entre les implants.

I componenti MedentiLOC angolato vi permette per la prima volta di compensare le divergenze tra impianti.

En effet, pour la pérennité de telles constructions prothétiques, l'axe d'insertion doit être le plus parallèle possible.

Per una longevità di tali lavori protetici è importante una perfetta parallelità.

Eingesetzt werden die rotationsindexierten Abutments mit einem speziellen Sechskantdreher.

Les piliers à rotation indexée sont fixés à l'aide d'un tournevis hexagonal spécial.

I componenti rotativi non indicizzati vengono inseriti tramite un cacciavite esagonale.

Optionaler Verschluss MedentiLOC® Abutment | Obturation optionnelle du pilier MedentiLOC® Chiusura facoltativa del foro MedentiLOC®



- Zentrale Bohrung nach dem definitiven Verschrauben mit (Mucopren soft®) füllen.
- Remplir le perçage central après vissage définitif avec du (Mucoprene soft®).
- Riempire il foro centrale dopo l'avvitamento definitivo con (Mucoprene soft®).

- Mit dem Finger Überschüsse bündig (der Kunststoff darf auf keinen Fall überständig sein) abstreifen und aushärten lassen (ca. 3-5 Minuten)
- Lisser l'excédent avec le doigt (la matière ne doit dépasser en aucun cas) puis laisser durcir (env. 3 à 5 minutes)
- Lisciare e Rimuovere la parte in eccesso (non deve oltrepassare il bordo) e lasciare indurire (dai 3 ai 5 minuti)

- Der „verschlossene“ MedentiLOC®
- Le MedentiLOC® „obturé“
- Il Componente MedentiLOC® „otturato“

- Ausheben des Verschlusszapfens mit einer Sonde beim späteren Entfernen des MedentiLOC® Abutment.
- Retrait du bouchon d'obturation avec une sonde lors du démontage du pilier MedentiLOC®.
- Al momento dello svitamento del componente MedentiLOC®, togliere il tappo di obturazione con una sonda.



- Vorsicht: Zum Eindrehen der **geraden** MedentiLOC-Abutments benötigen Sie unabhängig von der Serie immer einen Eindrehker Hex 1,26 Art-Nr. M 03-1 oder M 09-1, M 10-1, M 11-1, **abgewinkelten** MedentiLOC-Abutments Art-Nr. M 03-7 oder M 10-7.
- Attention: Pour visser les piliers **droit** MedentiLOC, quelle que soit la série, vous avez besoin d'un instrument de vissage Hex 1,26 mm, code article M 03-1 ou M 09-1, M 10-1, M 11-1, MedentiLOC **angulés** code article M 03-7 ou M 10-7.
- Attenzione: Per avvitare il componente **diritto** MedentiLOC, su tutte le serie avete bisogno del giravite Hex 1,26 mm, Nr.Art. M 03-1 oppure M 09-1, M 10-1, M 11-1, MedentiLOC **angolati** Nr.Art. M 03-7 oppure M 10-7.